



AKIŲ LAŠAI

Antioksidacinio ir drėkinančio poveikio akių tirpalas su natrio hialuronatu, vitaminais A ir E

SUDĖTIS

Natrio hialuronatas 0,15%, karboksimetilbeta-gljukanas, vitamino A palmitatas, vitaminas E TPGS ir SCO[®] izotoniniame buferiniame tirpale, kurio pH 7,0.

APRAŠYMAS

NAVITAE[®] PLUS akių lašų sudėtyje yra drėkinančios polisacharidinės kilmės medžiagos, tokios kaip natrio hialuronatas ir karboksimetilbeta-gljukanas bei apsauginė drėkinančioji lipofilinė sistema, kurią sudaro vitaminas A ir pegiliuotas vitaminas E.

Vitamino A vartojimas vietiskai palengvina kontaktinių lęšių nešiojimą, sumažindamas trinties bei mechaninius ragenos ir junginės epitelio pažeidimus.

Vitaminas A stabilizuoja ašarų plėvelės riebalinį sluoksnį, didindamas jo gebėjimą užtikrinti natūralų drėkinimą, ir taip sumažina sausų akių simptomus. Šį poveikį stiprina ir akių lašų sudėtyje esantys polisacharidai.

Vitaminas E yra antioksidantas, padedantis sumažinti laisvųjų radikalų koncentraciją ašarų skystyje, todėl sustiprina ragenos ir junginės epitelio ląstelių apsaugą, sumažina uždegimo riziką.

NAVITAE[®] PLUS sudėtyje yra SCO[®] (stabilizuotas oksichloro kompleksas) – specialus konservantas, išsaugantis buteliuke esančio tirpalo sterilumą. Veikiant šviesai, SCO[®] suskyla į komponentus, kurių natūraliai yra žmogaus ašarose, pavyzdžiui, natrio chloridą, deguonį ir vandenį, todėl jis gerai toleruojamas.

INDIKACIJOS

NAVITAE[®] PLUS – drėkinantis akių tirpalas, pasižymintis antioksidaciniu ir drėkinančiu poveikiu, vartojamas sausų akių sindromui ir akių diskomfortui palengvinti:

- esant akių sudirginimui, kurį sukėlė įvairios priežastys, pavyzdžiui, ragenos uždegimas, nepageidaujamos reakcijos po ragenos operacijos, trauminės opos;
- esant oksidaciniam stresui, pasireiškiančiam dėl šviesos poveikio ir (ar) padidėjusio laisvųjų radikalų kiekio akių paviršiuje;
- nešiojant kontaktinius lęšius.

NAVITAE[®] PLUS galima naudoti nešiojant visų rūšių kontaktinius lęšius.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- Nusiplaukite ir gerai nusausinkite rankas.
- Įsitikinkite, kad sandarus dangtelis yra nepažeistas.

• Norėdami atidaryti buteliuką, visiškai atsukite viršutinę dalį, atskirdami ją nuo apsauginės juostelės.

• Įlašinkite 1 ar 2 lašus į kiekvieną akį 3-6 kartus per dieną arba kaip pataria specialistas.

• Po naudojimo sandariai uždarykite buteliuką.

ĮSPĖJIMAI

• Siekiant išvengti galimos taršos, saugokite, kad lašintuvo galiuku neprisiiliestumėte prie bet koks paviršiaus ar akies.

• Nenaudokite, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai sudedamajai daliai.

• Įlašinus preparato, nežymus akių jautrumas gali pasireikšti trumpalaikiu dilgčiojimu ar dirginimu, kuris išnyksta pamirksėjus.

• Jei įlašinus preparato, dirginimas nesiliauja ir jaučiate skausmą, atsiranda paraudimas ar su-trinka rega, pasitarkite su gydytoju.

• Tirpalo negalima nuryti.

• Laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

• Nenaudokite tirpalo, pasibaigus tinkamumo laikui.

• Atidarius buteliuką, tirpalą būtina sunaudoti per 90 dienų.

• Nenaudokite, jei buteliukas yra pažeistas.

• Preparatą saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.

LAIKYMAS


• Laikyti 5–35 °C temperatūroje, nuo tiesioginės šviesos apsaugotoje vietoje.

3 ml (nemokamas pavyzdys) REF D3NP141

15 ml

REF D15NP142

STERILE A

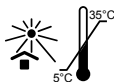

PLATINTOJAS:

UAB „Miečys“

Masiuliškių g. 15

Sutkūnai

LT-76116 Šiaulių raj.

Tel.: 8 800 12 345, www.miecy.lt



NOVAX[®] PHARMA

Le Coronado

20, Av. de Fontvieille

MC 98000 MONACO

www.novaxpharma.com



0051

V2 - Rev. 06/07/2018