

LT PAVARGUSIOMS AKIMS

NATŪRALŪS AKIŲ LAŠAI

Sausų ir pavargusių akių simptomams palengvinti

SUDĖTIS

Natrio hialuronatas 0,3%, P-Plus, alavijai (Aloe vera), kalio chloridas, kalcio chloridas, magnio chloridas, natrio chloridas, SCO[®] (stabilizuotas oksichloro kompleksas) izotoniniame buferiniame tirpale.

APRAŠYMAS

NAVI[®] VISION PLUS PAVARGUSIOMS AKIMS, tai gaivinamasis ir drėkinamasis oftalmologinis tirpalas, kurio sudėtyje yra natrio hialuronato 0,3%, gaunamo fermentacijos būdu (ne gyvūninės kilmės).

Natrio hialuronato veikimą optimizuoja ir pailgina sinerginis P-Plus[™] poveikis.

P-Plus[™] – vandenyje tirpus polimeras, turintis filmogeninių ir tepamųjų savybių. Natrio hialuronato ir P-Plus[™] junginys ne tik padidina tirpalo klampumą, bet ir pagerina jo sąveiką su gleivine savybe.

Elektrolitai (Cl⁻, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺ ir Mg⁺⁺), būtini ląstelių biocheminiams procesams, padeda išlaikyti gerą fiziologinę akies paviršiaus būklę.

NAVI[®] VISION PLUS PAVARGUSIOMS AKIMS sudėtyje yra alavijų.

Alavijai yra žinomi dėl savo drėkinamųjų ir raminamųjų savybių.

NAVI[®] VISION PLUS PAVARGUSIOMS AKIMS sudėtyje yra SCO[®] (stabilizuotas oksichloro kompleksas) specialus konservantas, išsaugantis buteliuke esančio tirpalo sterilumą. Veikiant šviesai, SCO[®] suskyla į komponentus, kurių natūraliai yra žmogaus ašarose, pavyzdžiui, natrio chloridą, deguonį ir vandenį, todėl jis gerai toleruojamas.

INDIKACIJOS

NAVI[®] VISION PLUS PAVARGUSIOMS AKIMS padeda palaikyti akių paviršiaus ir ašarų aparato fiziologinę būklę.

NAVI[®] VISION PLUS PAVARGUSIOMS AKIMS užtikrina greitą ir ilgalaikį palengvėjimą esant sausų akių pojūčiui, kurį sukelia patologinės arba nepatologinės sąlygos, susijusios su išoriniais veiksniais, pavyzdžiui, ilgu žiūrėjimu į televizoriaus ir kompiuterio ekraną, oro kondicionavimu, dulkėmis, dūmų tarša, saulės spinduliais.

NAVI[®] VISION PLUS PAVARGUSIOMS AKIMS galima naudoti nešiojant visų rūšių kontaktinius lęšius.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- Nusiplaukite ir gerai nusauskinkite rankas.
- Įsitikinkite, kad sandarus dangtelis yra nepažeistas.
- Norėdami atidaryti buteliuką, visiškai atsukite viršutinę dalį, atskirdami ją nuo apsauginės juostelės.
- Įlašinkite 1 ar 2 lašus į kiekvieną akį, pagal poreikį arba kaip pataria specialistas.
- Po naudojimo sandariai uždarykite buteliuką.

ĮSPĖJIMAI

- Siekiant išvengti galimos taršos, saugokite, kad lašintuvo galiuku neprisiliestumėte prie bet kokio paviršiaus ar akies.
- Nenaudokite, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai sudedamajai daliai.
- Įlašinus preparato, nežymus akių jautrumas gali pasireikšti trumpalaikiu dilgčiojimu ar dirginimu, kuris išnyksta pamirkęsis.
- Tirpalą negalima nuryti.
- Laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.
- Atidarius buteliuką, tirpalą būtina sunaudoti per 90 dienų.
- Nenaudokite tirpalo, pasibaigus tinkamumo laikui.
- Jei simptomai išlieka, kreipkitės į akių gydytoją.
- Nenaudokite, jei buteliukas yra pažeistas.
- Preparatą saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.

LAIKYMAS

- Laikyti 5–35 °C temperatūroje, nuo tiesioginės šviesos apsaugotoje vietoje.

3 ml (nemokamas pavyzdys) REF D3NVPT136

15 ml REF D15NVPT135

STERILE A



Platintojas:

UAB „Miečys“

Masiuliškių g. 15

Sutkūnai

LT-76116 Šiaulių raj.

Tel.: 8 800 12 345, www.miečys.lt

NOVAX[®] PHARMA

Le Coronado

20, Av. de Fontvieille

MC 98000 MONACO

www.novaxpharma.com

CE
0051

V2 - Rev. 25/10/2018