

HUMER Monodozės

### **Aprašymas**

Humer vienkartinėmis dozėmis yra sterilus izotoninis atskiesto jūros vandens tirpalas atskiriamomis vienkartinėmis 5 ml vienos dozės ampulėmis.

Indikacijos: Humer vienkartinėmis dozėmis yra medicinos priemonė reguliariai nosies landų higienai. Priemonė valo ir drėkina užsikimšusią, užgulusią ar tekančią nosį.

### **Savybės**

Esant viršutinių kvėpavimo takų uždegimui (dėl sudirginimo, alergijos, infekcijos), nosies sekretas gali būti gausus, sausas arba tirštas. Nosies pažeidimai (polipai, gerybinis auglys ir pan.) bei dažnas nosies pūtimas gali sudirginti gleivinę, ją pažeisti, sukelti sinusų skausmą.

Reguliariai ar retkarčiais naudojama priemonė Humer vienkartinėmis dozėmis drėkina nosies landas jų nedirgindama. Tai padeda lengviau pašalinti sekretą ir apsaugo nuo gleivinės sudirginimo.

Humer vienkartinėmis dozėmis galima naudoti kūdikiams nuo 1 mėnesio amžiaus.

### **Naudojimo būdas:**

Atskirkite Humer vienkartinėmis dozėmis ampulę ir atidarykite ją pasukdami kamštelį (netraukite jo).

Kūdikiams: paguldykite kūdikį ant priešingo nei nosies landa, kurią valysite, šono. Įkiškite ampulės galiuką į aukščiau esančią nosies landą, neliesdami nosies sparnelių. Švelniai suspauskite ampulę. Švaria nosine nuvalykite iš nosies landos ištekėjusį skysčio perteklių. Paguldę kūdikį ant kito šono, pakartokite veiksmus kitai nosies landai. Vaikams ir suaugusiesiems: naudokite Humer vienkartinėmis dozėmis stovėdami ar sėdėdami. Palenkite galvą ir įkiškite ampulės galiuką į aukščiau esančią nosies landą, neliesdami nosies sparnelių. Švelniai suspauskite ampulę. Palikite skystį kelias sekundes veikti nosies landoje. Palenkite galvą į kitą pusę ir švaria nosine nušluostykite ištekėjusį skysčio perteklių. Pakartokite veiksmus kitai nosies landai. Panaudotą ampulę išmeskite.

Humer vienkartinėmis dozėmis ampulės gali būti naudojamos kiekvienai nosies landai nuo 1 iki 6 kartų per dieną.

### **Atsargumo priemonės**

Humer vienkartinėmis dozėmis ampulės yra sterilios ir vienkartinės. Prieš naudodami patikrinkite, ar ampulė nepažeista. Nenaudokite, jei ampulė pažeista; nenaudokite kartą jau naudotos ampulės, priešingu atveju kyla infekcijos pavojus. Naudoti tik į nosį. Nepalikite vaikams pasiekiamoje ar matomoje vietoje. Laikykite ne aukštesnėje nei 25 °C temperatūroje. Nenaudokite pasibaigus ant ampulės ir pakuotės nurodytam tinkamumo laikui.

### **Kontraindikacijos**

Nenaudokite injekcijoms, akims bei jaunesniems nei 1 mėnesio amžiaus kūdikiams.

**Sudėtis:** 100 % Jūros vanduo, išgrynintas vanduo.

CE žymėjimo data: 2017 – Paskutinės peržiūros data: 2017 12

LT Platintojas: UAB „Miečys“, Masiuliškių g. 15, Sutkūnai, Šiaulių raj.,

LT-76104, tel. 8 800 12 345, [www.miecys.lt](http://www.miecys.lt)