

LT PUTOS AKIŲ VOKAMS AKIŲ TRAIŠKANOMS VALYTI

Tik išoriniam naudojimui

SUDĖTIS

Arbatmedžio (pražangialapė mirtenė) eterinis aliejus, ramunėlių (taurusis didramunis) eterinis aliejus, D-pantenolis, alantoinas, taurinas ir išgrynintas vanduo.

APRAŠYMAS ir INDIKACIJOS

Jei Jūsų akys yra sausas, jos niežti ar sudirgusios, problemų priežastis gali būti ne akys, o akių vokai. Kasdienė akių vokų ir blakstienų higiena, naudojant NAVIBLEF® DAILY CARE, turi daug privalumų, įskaitant minėtų simptomų susilpninimą.

NAVIBLEF® DAILY CARE nuo akių vokų veiksmingai pašalina perteklinę sekreciją, žiedadulkes ir pleiskaną, kurios padidina dirginimo, blefarito dėl *Demodex* erkučių (akių vokų erkučių) ir užsikrėtimo bakterijomis ar sausų akių simptomų atsiradimo riziką.

NAVIBLEF® DAILY CARE rekomenduojama palaikomajai priežiūrai pacientams, kurie naudojo NAVIBLEF® INTENSIVE CARE putas blefarito pažeistoms akių vokams valyti.

PAKUOTĖS

50 ml buteliukas su siurbliu dalytuvu REF F5ND263

5 ml buteliukas su siurbliu dalytuvu REF F5ND262

SAVYBĖS

NAVIBLEF® DAILY CARE - tai neriebios ir nedirginančios putos išoriniam naudojimui.

KAS YRA BLEFARITAS?

Tai yra lėtinis akių vokų uždegimas ir viena dažniausių bei pagrindinė akių diskomforto, paraudimo ir ašarojimo priežastis.

Kiti blefaritui būdingi akių simptomai yra deginimas, niežėjimas, jautrumas šviesai ir dirginimas bei smėlio ir šiurkštumo pojūtis akyse, kuris būna stipresnis prabudus.

KAS YRA SAUSOS AKYS


Tai ašarų plevėlės funkcijos sutrikimas dėl ašarų stokos ar per intensyvaus jų išgarinimo, galintis sukelti pažeidimus voko vidiniame ir akių paviršiuje.

AKIŲ OPERACIJOS ATVEJU

Prieš ir po akių operacijos yra rizika, kad išsivystys akių ir blakstienų infekcija, todėl svarbu vadovautis akių gydytojo rekomendacijomis dėl higienos ir priežiūros.

Platintojas: UAB „Miečys“
Masiuliškių g. 15, Sutkūnai
LT-76116 Šiaulių raj.
Tel.: 8 800 12 345, www.miecyss.lt

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

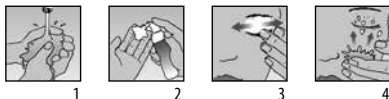

- 1 - Prieš putų naudojimą nusiplaukite rankas, po to pirštų galiukus nuvalykite NAVIBLEF® DAILY CARE.
- 2 - Paspauskite siurblinį dalytuvą ir užpurškite putų ant švarių pirštų galiukų. Jei putas naudojamos prieš operaciją arba po jos, putas rekomenduojama užpurkšti ant sterilaus tampono.
- 3 - Užsimerkite ir švelniai, sukamaisiais judesiais įtrinkite akies voką ir blakstienas NAVIBLEF® DAILY CARE. Naudojimo metu nelieskite akių ir neatsimerkite. Prieš atsimerdami leiskite putoms nudžiūti, kad priemonės nepatektų į akį. Putas palikite maždaug 60-80 sekundžių.
- 4 - Po kiekvieno panaudojimo blakstienas ir akių vokus nuplaukite šiltu vandeniu.

Pastaba. Tuos pačius veiksmus atlikite su kita akimi.

Naudokite 2-3 kartus per dieną ilgalaikiai akių vokų ir blakstienų priežiūrai ir higienai.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Visada prieš naudojimą ir po jo nusiplaukite rankas.
 - Prieš putų naudojimą išsiimkite kontaktinius lęšius. Prieš vėl įsidėdami kontaktinius lęšius įsitikinkite, kad pašalinti visi putų likučiai.
 - Naudojimo metu būkite užsimerkę.
 - Putos skirtos naudoti ant akių vokų ir blakstienų.
 - Nenaudokite tiesiai ant akių.
 - Tik išoriniam naudojimui.
 - Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.
 - Nenaudoti jaunesniems kaip 3 metų vaikams.
 - Akių srityje naudokite hipoalerginę kosmetiką ir losjoną jautriai odai.
 - Nenaudokite, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai putų sudedamajai daliai.
 - Jei pasireiškia dirginimas, nedelsdami nutraukite putų naudojimą, akis nuplaukite vandeniu ir, jei dirginimas neišnyksta, kreipkitės į akių gydytoją.
 - Po pirmojo atidarymo praėjus 6 mėnesiams, tirpalo likutį sunaikinkite.
 - Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui.
- LAIKYMAS**
- Laikyti sausoje vietoje, žemesnėje kaip 35 °C temperatūroje.

NOVAX® PHARMA
Le Coronado - 20, Av. de Fontvieille
MC 98000 MONACO
www.novaxpharma.com



V1 - Rev. 25-03-2016