

HUMER užsikimšusiai nosiai kūdikiams ir vaikams – 100 % jūros vandens – nosies purškalas

Kada naudoti HUMER užsikimšusiai nosiai kūdikiams ir vaikams?

HUMER užsikimšusiai nosiai kūdikiams ir vaikams pašalina nosies paburkimą ir yra naudojamas protarpiais pasireiškus peršalimui, sinusitui bei alerginiam rinitui 3 mėnesių ir vyresniems kūdikiams bei vaikams.

Jūros vandenyje natūraliai yra daug mineralų ir mikroelementų (kalio, natrio, kalcio, silicio, geležies, cinko, magnio).

Sudėtis

100% neskiesto jūros vandens.

HUMER užsikimšusiai nosiai kūdikiams ir vaikams yra sterilus hipertoniškas tirpalas be konservantų.

Savybės

Dėl hipertoniškos savybių **HUMER užsikimšusiai nosiai kūdikiams ir vaikams – 100% jūros vanduo** sumažina nosies gleivinės paburkimą, skatina tirštų gleivių pašalinimą, padeda pašalinti infekcijos sukėlėjus ir alergenų ir taip prisideda prie apsaugos nuo infekcijos.

Originali švelnios difuzijos mikrolašeliais sistema ir natūrali sudėtis užtikrina puikų toleravimą.

HUMER užsikimšusiai nosiai kūdikiams ir vaikams antgalis turi saugumo žiedą patogesniai ir saugesniai naudojimui.

Dozavimas

1-2 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2-3 kartus per dieną prieš valgį (žr. kitoje pusėje pateiktus nurodymus).

Atsargumo priemonės

Nenaudokite **HUMER užsikimšusiai nosiai kūdikiams ir vaikams – 100% jūros vanduo** jaunesniems kaip 3 mėnesių kūdikiams. To paties Humer **užsikimšusiai nosiai kūdikiams ir vaikams** buteliuko negalima naudoti keliems asmenims. Po kiekvieno panaudojimo antgalį reikia nuplauti šiltu vandeniu. Po panaudojimo buteliuką laikyti su uždėtu antgaliu dėžutėje. Jei yra stiprus gleivinės dirginimas, naudojimo metu gali pasireikšti dilgčiojimo pojūtis.

Jei simptomai negerėja (išlieka spalvotų ir tirštų nosies išskyrių) arba būklė sunkėja (atsiranda skausmas, karščiavimas), pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. Buteliuko, kuris nėra tuščias, negalima išmesti su buitinėmis šiukšlėmis.

Laikykitės ant buteliuko nurodyto tinkamumo laiko.

Įspėjimas. Slėginė talpyklė: kaitinama gali sprogti. Laikyti toli nuo karščio šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų užsidegimo šaltinių. Nerūkyti. Saugoti nuo saulės. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje. Nebadyti ir nedeginti net tuščios talpyklės. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Su tirpalu sąlyčio neturinčios inertiškos, nedegios išstūmimo dujos: azotas.

HUMER kūdikiams ir vaikams

Užsikimšusi nosis

Naudojimo nurodymai

KŪDIKIS



Kūdikį paguldykite, galvą pakreipkite į šoną. Atsargiai įkiškite antgalį į šnervę iki saugumo žiedo. Padarykite 2-3 sekundžių įpurškimą.



Galvą pakreipę į kitą pusę, procedūrą pakartokite į kitą šnervę.



Pakelkite vaiko galvą, kad pasišalintų gleivės. Nuvalykite audiniu.



Niekada nevalykite nosies atlošę vaiko galvą, kad skystis nenutekėtų į gerklę. Antgalį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

VAIKAS

Jei vaikas gali ir sėdėti, ir stovėti, pasirinkite patogiausią padėtį.



Pakreipkite galvą į vieną pusę, atsargiai įkiškite antgalį į šnervę ir padarykite 2-3 sekundžių įpurškimą.



Galvą pakreipę į kitą pusę, procedūrą pakartokite į kitą šnervę. Išpūskite nosį, kad pašalintumėte gleives.

Logotipai:

- Žaliasis taškas
- 50 ml
- CE 0459
- STERILE R

CE ženklą gavimo data: 2017

Paskutinė lapelio peržiūra: MM-MMMM



Laboratoires URGO Healthcare – 42 rue de Longvic -21300 Chenôve - Prancūzija

Platintojas: pavadinimas ir adresas